



レンタル商品の消毒・保管(入庫～出庫工程)

返却品の入庫



高温水高圧洗浄機による蒸気消毒

返却された商品は洗浄場に搬入され、蒸気消毒を行います。

オゾン殺菌機による殺菌

消毒・点検を終えた後、オゾン水にて十分に殺菌します。

消毒



清拭による消毒作業

乾燥室で水分を取り除いた後、「種目別消毒方法分類表」に基づき、手作業で細かい所まで注意を払いながら行います。



商品保管

清潔かつ整頓された倉庫にて、商品を保管、システム管理により先入先出を実施しております。

保管



ビニール梱包作業

清拭消毒後、ビニール梱包して、密封致します。

梱包



メンテナンス・点検作業

メーカーでのメンテナンス研修を修了したスタッフによるチェックのもとメンテナンス・点検を行っております。


メンテナンス

出庫

ベッドの選び方



電動ベッドの主な特徴

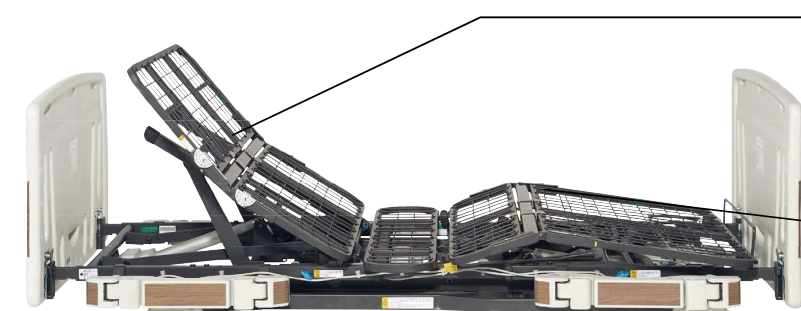

背上げ機能

背板が起き上がる角度を調節できます。毎日の起き上がりが大変な方に。また、膝上げと連動する機能を持つベッドもあります。



膝上げ機能

膝を曲げるように床板が持ち上がる角度を調節できます。下肢のむくみ解消や、背上げ時に体が前へずれるのを防ぎます。また、背上げと連動する機能を持つベッドもあります。



高さ調節機能

ベッドの高さが調節できます。立ち上がりの補助や端座位の保持に。また、シーツ交換や介助時の介護者の身体的負担も軽減してくれます。



電動介護ベッドにできること…


介護を受ける方の負担をへらし、自立を促します

- ・ベッドからの起き上がりや立ち上がりを電動機能でサポート。今までと同じ動作をより少ない力で行うことにより、ベッドを使う方の自立を促します。

介護する方の負担を減らします

- ・ベッド上での作業時は高さ調節機能で腰に負担のかからない高さに。着替えやオムツの交換時には膝上げ機能や背上げ機能を活用できます。

電動介護ベッドを安全にお使いいただくために

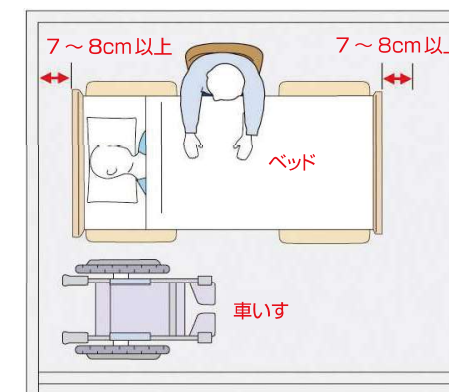

頭側・足側の確認・動線の確認をしましょう

- どちらを頭側・足側にするかを確認しましょう。
- 配置が決まったら、車いすへの移乗やトイレへの移動などできるかの「動線の確保」ができていないか検討してください。
- ドアや家具の引き出しの開閉に支障がないかも注意しましょう。



ベッド設置スペースの注意

住宅ケアベッドを設置するときには、ベッドの寸法に少し余裕を加えたスペースが必要です。壁にはぴったりとつけず7～8cm以上あけます。また、ベッドの「たかさ」を操作すると、ベッドは足側に動きますので、足側には7～8cm以上のスペースを確保してください。



取扱説明書をよく読んでください

取扱説明書には使用方法が記載されています。正しい使用方法を守らないと、思わぬけがにつながる恐れがあります。介護を受ける方はもちろん、ご家族の方や介助する方も取扱説明書を読み、大切に保管してください。

■ベッドサイドレール

サイドレールは、ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的としております。支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください。サイドレールは、ベッドへの取り付け、取り外しが素早くおこなえるように、ストッパー機能は付いておりません。体重がかかっている状態で抜けると転倒してけがをする恐れがあります。

■介助バー

ベッドの背上げをおこなう時は、アームをベッドの内側に向けて使用しないでください。アームとベッドの間に身体や手がはさまれてけがをする恐れがあります。

※ベッドボトムとサイドレールの隙間、サイドレール（介助バー）とサイドレールとの隙間に手や足・あたまなどが入らないように注意してください。

※サイドレールや介助バーの隙間に手や足を出したまま、背上げなどの操作をしないように注意してください。

特殊寝台

付特殊寝台品

床ずれ防止用具

車いす

付車いす品

スロープ

つ歩行補助

変換器位

歩行器

リフト移動用

手すり

機徘徊感知器

処自動排泄装置



ベッドの選び方



特殊寝台・特殊寝台付属品

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

車
い
す

付車
属い
品す

ス
ロ
ー
プ

つ
歩
行
補
助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り

機
徘徊
感知
器

処
理
装
置

低い

自立度

高い

14 ページに仕様一覧があります。
あわせてご活用ください。

Emi 3モーター
+ヘッドレスト
⇒ 13ページ



ラフィオ
3モーター
⇒ 12ページ



楽匠プラスH
3モーション
⇒ 7ページ



楽匠Z
3モーション
⇒ 9ページ



楽匠プラスX
3モーター
⇒ 8ページ



レント
3モーター
⇒ 10ページ



クオラONE
3モーター
⇒ 6ページ



ミオレットIII
3モーター
⇒ 11ページ



Emi 2モーター
+ヘッドレスト
⇒ 13ページ



ラフィオ
2モーター
⇒ 12ページ



楽匠プラスH
2モーション
⇒ 7ページ



楽匠Z
2モーション
⇒ 9ページ



楽匠プラスX
2モーション
⇒ 8ページ



レント
2モーター
⇒ 10ページ



クオラONE
2モーション
⇒ 6ページ



ミオレットIII
2モーター
⇒ 11ページ



※表は目安です。実際の選定については福祉用具専門相談員にご相談ください。

クオラONE

クオラONE

ベッド操作アプリ
DL用QRコード



アプリ対応



楽匠プラス同様にアプリ
で様々な便利な機能が
使用可

呼出受信機対応



スマホが無い方におすすめ。
音・振動・ライトでお知らせ
Bluetoothで接続するためインターネット環境不要
最大40メートルの距離まで呼出しが可能

業界最大手のパラマウントベッドの 最新のスタンダードモデル

～木製の高級感と便利な機能を備えた最新機種～



液晶表示付きスイッチ



2モーションによる新しい運動背上げ

3モーター らくらくモーション 背角度を高めて使用する方におすすめ。
背角度を高くてもアンカーが効いているため、
より姿勢の良い背上げ。

2モーション ACT駆動背膝連動 背角度を低めて使用する方におすすめ。
楽匠プラス2モーションと同じ動き
40°で膝がフラット。
低角度でご使用の方に適した動作。

クオラONE NEW 2モーション KQ-B6427

TAISコード 00170-001535



月額 料金	1割	非課税
2割	3割	

NEW 3モーター KQ-B6327

TAISコード 00170-001523



月額 料金	1割	非課税
2割	3割	

クオラONE シリーズ オプション

キャスター
KQ-PB3C
NEW



TAISコード	00170-001516		
月額料金		1割	
2割		3割	

延長フレーム
KQ-PB62L
NEW



TAISコード		00170-001520	
月額 料金		1割	
2割		3割	

延長マットレス
KE-551L



TAISコード	00170-000563		
月額 料金		1割	
2割		3割	

サイドレール



KS-161Q
TAISコード 00170-000527

長さ 96.4cm
有効高さ 約37cm (ボトム面より) 非課税

月額 料金	1割
2割	3割



KS-171Q
TAISコード 00170-000529

長さ 96.4cm
有効高さ 約43cm (ボトム面より) 非課税

月額 料金	1割
2割	3割



KS-191Q
TAISコード 00170-000752

長さ 82.7cm
有効高さ 約37cm (ボトム面より) 非課税

月額 料金	1割
2割	3割



KS-151Q
TAISコード 00170-000537

長さ 59.0cm
有効高さ 約37cm (ボトム面より) 非課税

月額 料金	1割
2割	3割

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

車
い
す

付車
属い
品す

ス
ロ
ー
プ

つ
歩
行
補
助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り

機
徘徊
感知
器

処
理
装
置



特殊寝台・特殊寝台付属品

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

車
い
す

付車
属い
品す

ス
ロ
ー
プ

つ
歩
行
補
え
助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り

機
徘徊
感知
器

処
理
装
置

楽匠プラス Hタイプ

(パラマウントベッド)

楽匠_{プラス}

らくしょう₊プラスシリーズ

業界最大手のパラマウントベッドの 最上位機種

～負担の少ない快適な姿勢をご提供します～

ベッド操作アプリ
DL用QRコード



液晶表示付きスイッチ



もっと、もっと、身体にやさしくするために

介護用ベッド最も利用されている背上げ機能をさらに磨き上げています。全面的に作り直したプラスラインボトムをシリーズ全機種に採用することで、先進のラクリアモーションからボトムだけを動かすものまで、すべての背上げ機能がグレードアップしています。



腰ボトム	ベッドと体の軸を合わせる
腰サポート	骨盤を立てる
背サポート	姿勢の崩れを防ぐ
膝サポート	身長差をカバーする

もっと、介護する方とつながるために

スマートフォン用の専用アプリも用意しました。家庭内呼び出し機能で、手元スイッチからスマートフォンに発信できます。また、スマートフォンでベッドの操作ができます。使用方法も動画で確認できます。ご家族とつながることで、よりよい介護の実現をサポートします。

「ベッド操作」アプリ

パラマウントベッド

このアプリでできること <登録制限付き>

- ベッドの操作: アプリからベッドの操作ができます。
- ベッドからの呼び出し通知の受信: 手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、スマートフォンに通知が届きます。
- 使用方法を動画でいつでも確認可能: 使い方に不安や心配があれば介護者自身で何度でも確認可能。
- コンタクトは随時アップ予定: ベッドの使い方の動画。

ラクリアモーション背上げ搭載 まるでソファのような快適な座り心地

■「今までの背あげ」では…

■ラクリアモーションの背あげ

・ハムストリングスが突っ張ってつらい姿勢
・上半身が倒れやすい

・腰の圧迫が少ない
・膝がテーブル裏にあたる
・座りやすい！
・上半身が倒れにくい

・腰の圧迫が少ない！
・膝がテーブル裏にあたる
・座りやすい！
・上半身が倒れにくい

・ハムストリングスが突っ張る
・上半身が倒れやすい

・腰の圧迫が少ない！
・膝がテーブル裏にあたる
・座りやすい！
・上半身が倒れにくい

離床もしやすい 足がおろしやすい



呼出受信機対応



スマホが無い方におすすめ。
音・振動・ライトでお知らせ
Bluetoothで接続するためインターネット環境不要
最大40メートルの距離まで呼出しが可能

楽匠プラスHタイプ 2モーション

TAISコード 00170-001300

91cm幅 KQ-A5322
83cm幅 KQ-A5122



月額料金	1割
2割	3割

非課税

3モーション

TAISコード 00170-001328

91cm幅 KQ-A6322
83cm幅 KQ-A6122



月額料金	1割
2割	3割

非課税

特殊寝台・特殊寝台付属品



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

車
い
す

付車
属い
品す

ス
ロ
ー
プ

つ
歩
行
補
え
助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り

機
徘徊
感知
器

処
理
装
置

楽匠プラス Xタイプ

(パラマウントベッド)

楽匠_{プラス}

らくしょう₊プラスシリーズ

業界最大手のパラマウントベッドの 超低床機種

～初めてベッドを利用される方でも安心の低さ～

ベッド操作アプリ
DL用QRコード



液晶表示付きスイッチ



もっと、もっと、身体にやさしくするために

介護用ベッド最も利用されている背上げ機能をさらに磨き上げています。全面的に作り直したプラスラインボトムをシリーズ全機種に採用することで、先進のラクリアモーションからボトムだけを動かすものまで、すべての背上げ機能がグレードアップしています。

「ベッド操作」アプリ

パラマウントベッド

このアプリでできること <登録制限付き>

- ベッドの操作: アプリからベッドの操作ができます。
- ベッドからの呼び出し通知の受信: 手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、スマートフォンに通知が届きます。
- 使用方法を動画でいつでも確認可能: 使い方に不安や心配があれば介護者自身で何度でも確認可能。
- コンタクトは随時アップ予定: ベッドの使い方の動画。

もっと、介護する方とつながるために

スマートフォン用の専用アプリも用意しました。家庭内呼び出し機能で、手元スイッチからスマートフォンに発信できます。また、スマートフォンでベッドの操作ができます。使用方法も動画で確認できます。ご家族とつながることで、よりよい介護の実現をサポートします。

「ベッド操作」アプリ

パラマウントベッド

このアプリでできること <登録制限付き>

- ベッドの操作: アプリからベッドの操作ができます。
- ベッドからの呼び出し通知の受信: 手元スイッチの呼び出しボタンを押すと、スマートフォンに通知が届きます。
- 使用方法を動画でいつでも確認可能: 使い方に不安や心配があれば介護者自身で何度でも確認可能。
- コンタクトは随時アップ予定: ベッドの使い方の動画。

呼出受信機対応




スマホが無い方におすすめ。
音・振動・ライトでお知らせ
Bluetoothで接続するためインターネット環境不要
最大40メートルの距離まで呼出しが可能

最低床高15cm

組立て時の脚座を向きによって
最低床高15cmと21cmを1台で使い
分けることができる

低床 床高21cm 超低床 床高15cm

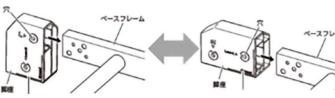

楽匠プラスXタイプ

2モーション

TAISコード 00170-001279

91cm幅 KQ-A4322
83cm幅 KQ-A4122



月額料金	1割
2割	3割

非課税

3モーター

TAISコード 00170-001265

91cm幅 KQ-A3322
83cm幅 KQ-A3122



月額料金	1割
2割	3割

非課税

楽匠プラスシリーズ オプション

楽匠プラス 呼出受信機

KQ-PA0J

寸 法	全高10.5×全幅6 ×奥行1.8cm
重 量	90g
感知エリア	最大40m



手元スイッチからの呼び出しを受信して、ライトの点滅、音、振動で知らせます。

- 介護用ベッドの家庭内呼び出し機能に対応
- 1台のベッドに対して複数の受信機を登録可能(台数制限無し)
- 中継機として利用でき、さらに広いエリアに対応可能
- 電源: 充電式 (ACアダプター、電源ケーブル付属)

月額料金	1割
2割	3割

課税



特殊寝台・特殊寝台付属品

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

車
い
す

付車
属い
品す

ス
ロ
ー
プ

つ
歩
行
補
助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り

機
徘徊
感知
器

処
理
装
置

楽匠Zシリーズ 2モーション

(パラマウントベッド)

JIS 認証取得



レギュラーサイズ

91cm幅 KQ-7231 83cm幅 KQ-7211

ミニサイズ

91cm幅 mini KQ-7221 83cm幅 mini KQ-7201

重量	KQ-7231	85.5kg
	KQ-7211	83.5kg
	KQ-7221	85.0kg
	KQ-7201	83.0kg

※3モーションと同じサイズになります。

※全サイズ木製ボードもあります。

TAISコード 00170-000777


月額料金	1割
2割	3割

非課税

楽匠Zシリーズ 3モーション

(パラマウントベッド)

JIS 認証取得

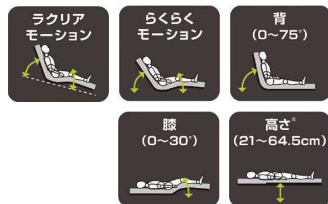

レギュラーサイズ


91cm幅 KQ-7331 83cm幅 KQ-7311

ミニサイズ

91cm幅 mini KQ-7321 83cm幅 mini KQ-7301

重量	KQ-7331	86.5kg
	KQ-7311	84.5kg
	KQ-7321	86.0kg
	KQ-7301	84.0kg

A全長	レギュラー:212.3cm ミニ:201.3cm
B全幅	91幅:99.9cm 83幅:92.9cm
C全高	61.7~105.2cm

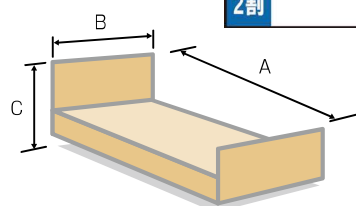

非課税

TAISコード 00170-000785

月額料金	1割
2割	3割

※全サイズ木製ボードもあります。

楽匠Zシリーズ オプション

延長フレーム

91cm幅 KQ-P72L

TAISコード 00170-000793

83cm幅 KQ-P70L

TAISコード 00170-000792

課税

月額料金	1割
2割	3割

※楽匠Zシリーズ専用オプション



キャスター

KQ-P70C(4個セット)

TAISコード 00170-000794


※ベッドの高さは変わりません
※4輪すべてストッパー付き

課税

月額料金	1割
2割	3割

スイングアーム介助バー

ベッドからの立ち上がり動作をしっかりサポート

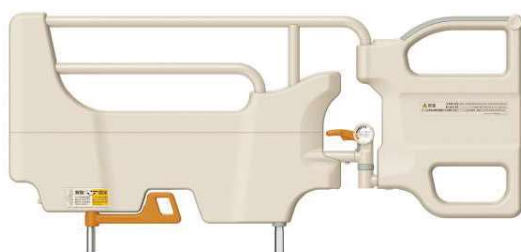

KS-099A

TAISコード 00170-001205


課税

長さ	112cm
有効高さ	約41cm (ボトム面より)

月額料金	1割
2割	3割

サイドグリップ

コンパクトなベッド用手すり寝返りや
起き上がりもサポート

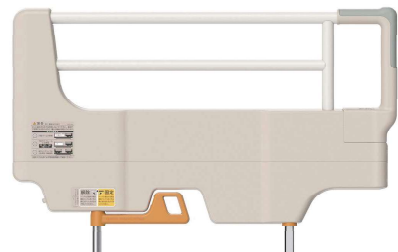

KS-030A

TAISコード 00170-000897

課税

長さ	82.2cm
有効高さ	約41cm (ボトム面より)

月額料金	1割
2割	3割

特殊寝台・特殊寝台付属品



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

車
い
す

付車
属い
品す

ス
ロ
ー
プ

つ
歩
行
補
助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り

機
徘徊
感知
器

処
理
装
置

レントシリーズ

(パラマウントベッド)


薄型・軽量の樹脂製ボードによるコンパクト設計



省スペース設計と新しいカラーデザインで ご家庭での
使いやすさに配慮した低床電動ベッド。

大きくて見やすい液晶表示
付き手元スイッチ

低床22cm~62cmまでの垂直昇降機能

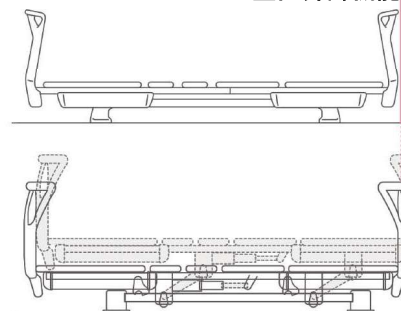

91cm幅 2モーター(79.5kg)

2M-KQ-68233

TAISコード 00170-001023

非課税

月額料金	1割
2割	3割

91cm幅 3モーター(80.5kg)

3M-KQ-68333

TAISコード 00170-001020

非課税

月額料金	1割
2割	3割



オプションにてミントグリーン・ソフトピンクもございます。

レントシリーズ オプション

キャスター

KQ-P68C

TAISコード 00170-001031



※ベッドの高さは変わりません。
※4輪すべてストッパー付き。

課税

月額料金	1割
2割	3割

レント専用低床脚座

KQ-P68A

TAISコード 00170-001030

※最低床高: 15cm

課税

月額料金	1割
2割	3割



標準装備品




オプション脚座セット装着

スイングアーム介助バー

KS-098A

TAISコード 00170-000898

長さ	112.1cm
有効高さ	約41cm (ボトム面より)

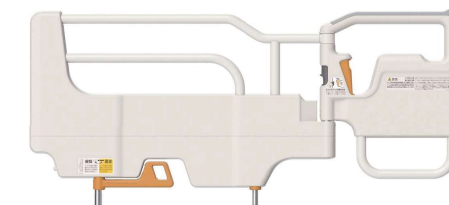

ベッドからの立ち上がり動作を
しっかりサポート

課税

月額料金	1割
2割	3割



特殊寝台・特殊寝台付属品

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
防止用具

車
いす

付車
属い
品す

ス
ロープ

つ
歩行
補助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り


機
徘徊
感知
器

処
理
装
置

ミオレットIII

(ブラッツ)

ミオレットシリーズ
Miolet III

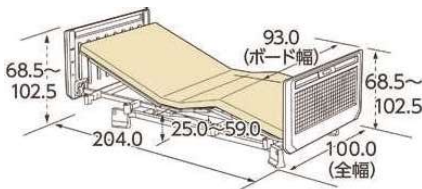

2モーター P113-21AC

TAISコード 00631-000553



重量 85.5kg

月額料金	1割
2割	3割

非課税

3モーター P113-31AC

TAISコード 00631-000557



重量 86.5kg

月額料金	1割
2割	3割

非課税

※3モーターベッドのご利用の際には
2モーター+3モーター変換キットと
なります。

ミオレットIII オプション

ミオレットIII専用キャスター

PC03-8CK(4個セット)

TAISコード 00631-000561



※装着時の床面高は+ 1.5cm になります。


課税

月額料金	1割
2割	3割

ベッド用グリップ「ニーパロL (エル)」

PG03-116MP

TAISコード 00631-000536

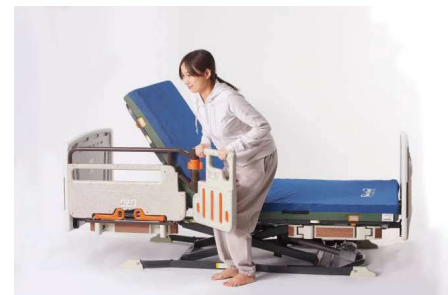

開閉式で立ち座りサポートし、
膝を支える膝パッドがより安全
安心です。

課税

月額料金	1割
2割	3割

特殊寝台・特殊寝台付属品



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
防止用具

車
いす

付車
属い
品す

ス
ロープ

つ
歩行
補助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り

機
徘徊
感知
器

処
理
装
置

ラフィオ

(ブラッツ)

超低床
ポジショニングベッド

ラフィオ

Rafio

2
モーター

3
モーター

ポジショニングとは・・・
「適切な姿勢（体位）を安全で快適に保持すること」



01 ハイバックサポート機能

02 膝位置の
フィッティング機能

2モーター

P110-21ACR

TAISコード 00631-000331

重量 94.9kg

非課税

月額料金	1割
2割	3割

3モーター

P110-71ACR

TAISコード 00631-000341

重量 96.9kg

非課税

月額料金	1割
2割	3割

2
モーター

2モーター
電動ハイバックサポート
機能付



自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPII」



PF500-116P

TAISコード 00631-000235

課税

重量 116.5cm

全高 52.0cm

月額料金	1割
2割	3割



従来のベッド用グリップを使った移乗では、膝が前方向にズレ落ちると危険な状態になる事もありました。
※ひざ折れ状態

これに対し「安心ひざパッド ニーパロ・パッド」を使うと...



○膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。

○立ち上がるときは写真のように膝をパッドにあて、腕を引く事で腰が浮きやすくなり、より少ない力で臀部を持ち上げる事が可能です。

サイドレール(ショート)

PA505-441(1本)

TAISコード 00631-000318



非課税

月額料金	1割
2割	3割

サイドレール(レギュラー)

PA505-751(1本)

TAISコード 00631-000319




非課税

月額料金	1割
2割	3割

サイドレール(ロング)

PA505-961(1本)

TAISコード 00631-000320

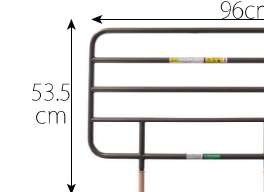

非課税

月額料金	1割
2割	3割

ラフィオ用超低床用キャスター

PC01-5CK(4個セット)

TAISコード 00631-000461

床高 15.5cm(+0.5cm)

月額料金	1割
2割	3割

課税

※人感センサー付フットライト、サイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。



ラフィオ用ハイトスペーサー

PH04-80(4個セット)

TAISコード 00631-000463

床高 23.0cm(+8.0cm)

月額料金	1割
2割	3割

課税





特殊寝台・特殊寝台付属品

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

付車
属い
品す

スロープ

歩行
補え
助

変換
器位

歩行
器

リ移
フ動
ト用

手すり

機徘徊
器感知

処自動
理装排
置

Emi (エミ)

(シーホネス)

介護を取り巻く環境にもっと笑顔を



Emi 紹介動画

Emi / トールタイプ 樹脂ボード[木目ライト]

【低床タイプ】床高 25～67.5cm / 【超低床タイプ】床高 20～62.5cm
脚座の差し込み方向を縦・横と変えるだけで、利用者に合ったベッド
高さに切換えることができます。

液晶表示付手元スイッチ



全 長	ショート : 192cm レギュラー : 203cm ロング : 217cm
全 幅	90幅:99 (91.5) cm ※1
全 高	64.5～107cm ※2

※1()は、サイドレールホルダー収納時
※2 低床タイプ、超低床はマイナス5cm

重 量	WR2-90H14 90.1kg WR3-90H14 90.8kg
-----	--------------------------------------

かつてない多彩なポジショニングが可能
ADL の改善・QOL の向上に！

電動ヘッドレスト機能

ADL ポジション | 誤嚥リスクの低減に

「頸部前屈位」という頸を引いた前向き目線の姿勢になり、誤嚥
リスクを低減します。ベッド上での食事や投薬時に、また口腔ケ
ア時のポジショニングにご使用ください。



QOL ポジション | 安楽姿勢に

上体が起きるので、ご家族と目線が合いやすくコミュニケーション
をとる場合に最適。またベッド上でTVを見たり、本を読んだ
りする場合にも活用でき、快適にお過ごしいただけます。



業界最高※の脚上げ

在宅医療への活用に / 床ずれリスク軽減に

脚先は下がらず、水平になるため
むくみ解消効果がより期待できます。



※2020 年 9 月時点

特殊寝台仕様一覧

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

付車
属い
品す

スロープ

歩行
補え
助

変換
器位

歩行
器

リ移
フ動
ト用

手すり

機徘徊
器感知

処自動
理装排
置

M 2モーターベッド

商品名	サイズ幅 × 高さ × 長さ(cm)	床幅 (cm)	昇降	床高さ (cm)	背上げ	角度 (度)	膝上げ	角度 (度)	特殊動作	サイド レール 受け
クオラONE	99.9×65~100 ×190.7~201.7	83 91	電動	25~60	電動	0~75	背連動	0~20	2モーション連動	4箇所
楽匠プラスH	99.4×61.6~105.1 ×201.4~212.4	83 91	電動	21~64.5	電動	0~75	背連動	0~14	2モーション連動	4箇所
楽匠プラスX	99.4×61.6~105.1 ×201.4~212.4	83 91	電動	21~64.5 (15~58.5)	電動	0~75	背連動	0~14	2モーション連動	4箇所
楽匠Z	99.9 (83幅:92.9) 61.7~105.2 ×201.3~212.3	83 91	電動	21~64.5	電動	0~75	背連動	0~14	ラクリアモーション	4箇所
レント	99.7×62.9~102.9 ×203	91	電動	22~62	電動	0~75	背連動	0~20	垂直昇降	4箇所
ミオレットIII	100×68.5~102.5 ×204	83 91	電動	25~59	電動	0~70	背連動	0~22	ライジングモーション バックオフ機構	4箇所
ラフィオ	100×60~102 ×211	91	電動	15~57	電動	0~70	背連動	0~22	超低床15cm ハイバック連動20度	4箇所
Emi	99×64.5~107 ×192~217	90	電動	25~67.5 (20~62.5)	電動	0~70	背連動	0~30	ヘッドレスト機能 スイングバックボトム	4箇所

M 3モーターベッド

商品名	サイズ幅 × 高さ × 長さ(cm)	床幅 (cm)	昇降	床高さ (cm)	背上げ	角度 (度)	膝上げ	角度 (度)	特殊動作	サイド レール 受け
クオラONE	99.9×65~100 ×190.7~201.7	83 91	電動	25~60	電動	0~75	電動	0~30	らくらくモーション	4箇所
楽匠プラスH	99.4×61.6~105.1 ×201.4~212.4	83 91	電動	21~64.5	電動	0~75	電動	0~30	ラクリアモーション	4箇所
楽匠プラスX	99.4×61.6~105.1 ×201.4~212.4	83 91	電動	21~64.5 (15~58.5)	電動	0~75	電動	0~30	らくらくモーション	4箇所
楽匠Z	99.9 (83幅:92.9) 61.7~105.2 ×201.3~212.3	83 91	電動	21~64.5	電動	0~75	電動	0~14	ラクリアモーション	4箇所
レント	99.7×62.9~102.9 ×203	91	電動	22~62	電動	0~75	電動	0~30	垂直昇降	4箇所
ミオレットIII	100×68.5~102.5 ×204	83 91	電動	25~59	電動	0~70	電動	0~18	ライジングモーション バックオフ機構	4箇所
ラフィオ	100×60~102 ×211	91	電動	15~57	電動	0~70	電動	0~22	超低床15cm ハイバック連動20度	4箇所
Emi	99×64.5~107 ×192~217	90	電動	25~67.5 (20~62.5)	電動	0~70	電動	0~45	ヘッドレスト機能 スイングバックボトム	4箇所

キャスター

K-129WR

TAISコード 00167-000209

※床高28cm(+3)



課税	月額 料金	1割
	2割	3割

回転式アーム介助バー

K-47R

TAISコード 00167-000226




長さ	119.0cm	月額 料金	1割
高さ	39.5cm(ボトム面より)	2割	3割

サイドレール(レギュラー)

K-170R(2本1組)

TAISコード 00167-000111

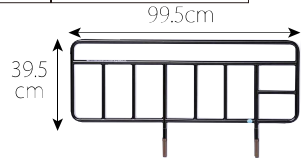


非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

サイドレール

K-173(2本1組)

TAISコード 00167-000183

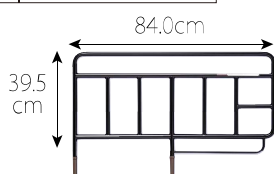


非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

サイドレール(レギュラー・ロング)

K-195RX(1本)

TAISコード 00167-000233

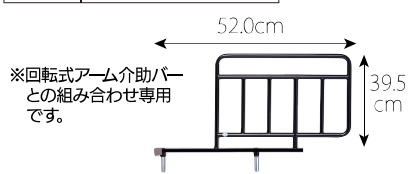

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

付車
属い
品す

スロープ

歩行
補え
助

変換
器位

歩行
器

リ移
フ動
ト用

手すり

機徘徊
器感知

処自動
理装排
置



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

車
い
す

付車
属い
品す

ス
ロ
ー
プ

つ
歩
行
補
助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り

機
徘徊
感知
器

自
動
排
泄
装置

ベッドサイドテーブル



KF-1920 (パラマウントベッド)

TAISコード 00170-000716

寸法 幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm

重量 14.0kg

- レバー操作で高さの調節ができます
- テーブルトップはダップ樹脂化粧板張り
- キャスター付

課税	月額料金	1割
	2割	3割



KF-1950 (パラマウントベッド)

TAISコード 00170-000717

寸法 幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm

重量 14.0kg

課税	月額料金	1割
	2割	3割

ガス圧昇降テーブル



PT03-840MB (ブラッツ)

TAISコード 00631-000618

寸法 幅84×奥行43×高さ60～84cm

重量 14.4kg (耐荷重30kg)

課税	月額料金	1割
	2割	3割

リハビリテーブル



KF-840 (パラマウントベッド)

TAISコード 00170-000489

寸法 幅79×奥行58×高さ54～79cm

重量 13.0kg

課税	月額料金	1割
	2割	3割

リハビリテーブル



KF-850 (パラマウントベッド)

TAISコード 00170-000265

寸法 幅90×奥行63.4cm

重量 20.0kg

高さ 53～78cm(11段階調節)

甲板角度 0°(水平)15°30°90°

材質 本体/スチール製
本体/メラミン樹脂化粧板張り

キャスター (双輪)前輪/φ5cm
後輪/φ3cm

課税	月額料金	1割
	2割	3割

オーバーベッドテーブル



KF-833LB (パラマウントベッド)

TAISコード 00170-000317

寸法 幅128.4×奥行63.4×高さ63～95cm

重量 24.0kg

天板 ダップ樹脂化粧板張り

課税	月額料金	1割
	2割	3割

オーバーテーブル

(パラマウントベッド)



100cm幅 KQ-060W 全長:110.8×幅31cm

TAISコード 00170-000375

91cm幅 KQ-060L 全長:99.8×幅31cm

TAISコード 00170-000374

83cm幅 KQ-060M 全長:93×幅31cm

TAISコード 00170-000373

課税	月額料金	1割
	2割	3割

アジャストテーブル

(パラマウントベッド)



ベッドの幅に合わせてサイズの変更が可能なテーブル。91cmと83cmに対応しています。

KQ-090

TAISコード 00170-000188

課税	月額料金	1割
	2割	3割

イージーグライドM

KZ-A29036 (パラマウントベッド)

TAISコード 00170-000570

サイズ 長さ60×幅33cm 橋渡しをする距離 10cm以下

重量 0.9kg ボードの両端 15cm以上

材質 ポリエチレン

表面の滑りやすさを利用し、対象者を座位姿勢のまま移乗させることができる。十分な強度と柔軟性を兼ね備え挿入や取り外しも容易。車いすの車輪や突起物をガードできます。

課税	月額料金	1割
	2割	3割



段差が5cm以上の時、エアーマット使用時には、ご利用をお控えください。

イージーモーション

MEMV (モルテン)

TAISコード 00054-000032



段差が5cm以上の時、エアーマット使用時には、注意してご利用ください。

サイズ 長さ78×幅38cm

重量 1.2kg

材質 ABS樹脂 裏面滑り止めシート付

橋渡しをする距離 白線の内側

課税	月額料金	1割
	2割	3割



スライディングボードの使い方
表面の滑りやすさを利用し、対象者を座位姿勢のまま移乗させることができます。十分な強度と柔軟性を兼ね備え、挿入や取り外しも工夫しています。

点滴スタンド

SG-264WBGS



月額料金

※保険適用外

かたさ

かため

やわらかめ

ポイント1 寝具の好みをチェックしましょう

ご本人になじみやすいのは、使い慣れた寝具により近いものです。しかし、好みだからといって柔らかすぎるものを選ぶと、からだがかたくなってしまうなどのデメリットもあります。ご本人のお好みと現在の状態、その両方を考慮して選びましょう。



ソフィア (ハード面)

→ 18ページ



ユービーポイント (ハード面)

→ 17ページ



ベシスサポートマットレス

→ 18ページ



エバーフィットC3 (ソフト面)

→ 18ページ



ストレッチフィットマットレス

→ 17ページ



アミカルサポートマットレス

→ 17ページ



コアマットレス10 cloud

→ 18ページ



プレグラーマットレス

→ 17ページ



エバーフィットC3 (ハード面)

→ 18ページ



ユービーポイント (ハード面)

→ 17ページ



ユービーポイント (ソフト面)

→ 17ページ




ソフィア (ソフト面)

→ 18ページ



ストレッチスリムマットレス

→ 17ページ

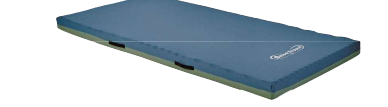

アミカルサポートマットレス

→ 17ページ




コアマットレス10 cloud

→ 18ページ



メリー&ハリー (ハリー面)

→ 18ページ

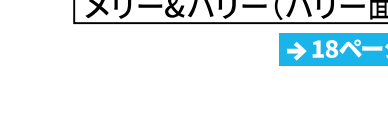

コンフォートダブル (ハード面)

→ 17ページ



ユービーポイント (ソフト面)

→ 17ページ



アルファプラすくっとRe

→ 18ページ




メリー&ハリー (メリー面)

→ 18ページ



メリー&ハリー (メリー面)

→ 18ページ

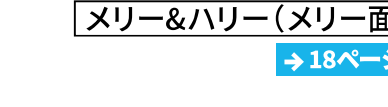

メリー&ハリー (メリー面)

→ 18ページ



メリー&ハリー (メリー面)

→ 18ページ

ポイント2 マットレスの製品特性

マットレスの寝心地、硬さ、厚さなどに加えて、端座位保持や立ち上がりに影響するマットレスの「縁」も重要な要素です。通気性やお手入れの方法は、クッション材やカバーの材質によって異なりますので、福祉用具専門相談員やケアマネジャーと相談しましょう。

※表は目安です。実際の選定については福祉用具専門相談員にご相談ください。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

車
い
す

付車
属い
品す

ス
ロ
ー
プ

つ
歩
行
補
助

変
体
換
器
位

歩
行
器

リ
移
フ
動
ト
用

手
す
り

機
徘徊
感知
器

自
動
排
泄
装置



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
防止用具

車いす

付車
属品

スロープ

歩行
補助

変換
器位

歩行
器

リ移
フ動
ト用

手
すり

機 徘徊
器 感知

処 自動
理 装置
排 泄

ストレッチスリムマットレス(通気タイプ)
(パラマウントベッド)

マットレスが伸びて体のすれを軽減。
電動ベッドの優れた機能を引き出す
ズレにくいマットレス。



91cm幅 KE-771TQ	91cm幅 mini KE-772TQ
TAISコード 00170-000745	TAISコード 00170-000746
83cm幅 KE-773TQ	83cm幅 mini KE-774TQ
TAISコード 00170-000747	TAISコード 00170-000748

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

プレグラーマットレス
(パラマウントベッド)



91cm幅 KE-551Q	91cm幅 mini KE-5511Q
TAISコード 00170-000159	TAISコード 00170-000286
83cm幅 KE-553Q	83cm幅 mini KE-5531Q
TAISコード 00170-000142	TAISコード 00170-000285

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

アミカルサポートマットレス通気
(ブラッツ)

ハイバック・背・膝のリクライニングに
対する高い追従性と体圧分散性を
高めたハイグレードウレタン



リバーシブル	91cm幅 PM11-9009
	TAISコード 00631-000506

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

コンフォートダブルマットレス
(ライフモア)

弾力があり寝心地の良い
マットレスです。




リバーシブル	91cm幅 KMPR-91B	91cm幅 ショート KMPR-91BS
	TAISコード 01435-000001	TAISコード 01435-000002
	83cm幅 KMPR-83B	83cm幅 ショート KMPR-83BS
	TAISコード 01435-000004	TAISコード 01435-000005

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

ユービーポイントマットレス
(ブラッツ)

硬さが選べるリバーシブルタイプ

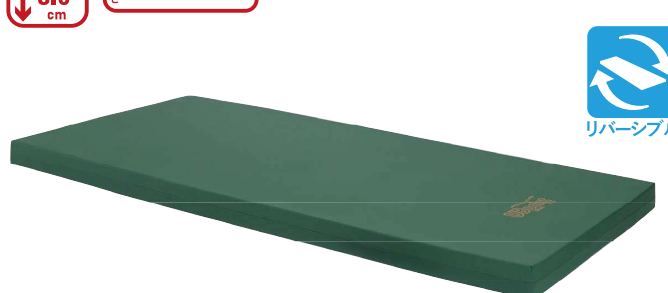

90cm幅 PM09-A9008 (通気タイプ)
TAISコード 00631-000464
90cm幅 PD503-A9008 (防水タイプ)
TAISコード 00631-000247

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

ストレッチフィットマットレス(通気)
(パラマウントベッド)

上層 優れた体圧分散性
下層 マットレスが伸びて体のすれを軽減。
電動ベッドの優れた機能を引き出す
ズレにくいマットレス。



91cm幅 KE-781TQ	91cm幅 mini KE-782TQ
TAISコード 00170-000735	TAISコード 00170-000736
83cm幅 KE-783TQ	83cm幅 mini KE-784TQ
TAISコード 00170-000737	TAISコード 00170-000738

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床
防止用具

車いす

付車
属品

スロープ

歩行
補助

変換
器位

歩行
器

リ移
フ動
ト用

手
すり

機 徘徊
器 感知

処 自動
理 装置
排 泄

アルファブラすくっとRe 通気タイプ
(タイカ)

硬さの異なるウレタンフォームを組み合わせる
ことにより、寝返りや起き上がりをはじめとする
ベッド上での動きをサポートします。



91cm幅 TS-SKT-ReA1R	91cm幅 mini TS-SKT-ReA1S
TAISコード 00563-000108	TAISコード 00563-000109
83cm幅 TS-SKT-ReA3R	83cm幅 mini TS-SKT-ReA3S
TAISコード 00563-000106	TAISコード 00563-000107

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

メリー&ハリー
(ケーブ)

柔らかめサイドと硬めサイド、
どちらも心地よいリバーシブルマットレス。



90cm幅 CR-681	90cm幅 mini CR-682
83cm幅 CR-680	TAISコード 00206-000079

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

ソフィア 防水タイプ
(モルテン)



長時間維持する体圧分散性能と
2つの寝心地を選べるリバーシブル構造マットレス

91cm幅 MHA1091A	91cm幅 mini MHA1091SA
TAISコード 00054-000308	TAISコード 00054-000309
83cm幅 MHA1083A	83cm幅 mini MHA1083SA
TAISコード 00054-000306	TAISコード 00054-000307

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

ベシスサポートマットレス
(ブラッツ)

ウレタンによるやわらかさと、寝返りしやすい
適度な硬さを両立した、ショート・レギュラー・
ロングに対応できるマットレス



90cm幅 PM14-A9008L (通気タイプ)	非課税
TAISコード 00631-000596	
90cm幅 PM15-A9008L (清拭タイプ)	
TAISコード 00631-000600	

月額 料金	1割
2割	3割

コアマットレス10 cloud 通気タイプ NEW
(シーホンス)

ベッドの動きに追従するしなやかさを
もち、背上げ時のズレ力を軽減します。
優れた撥水性と体圧分散性能。



91cm幅 SA-8203L
TAISコード 00167-000401

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

エバーフィットマットレスC3通気タイプ
(パラマウントベッド)

リバーシブル



91cm幅 KE-611TQ	91cm幅 mini KE-612TQ
TAISコード 00170-001042	TAISコード 00170-001043
83cm幅 KE-613TQ	83cm幅 mini KE-614TQ
TAISコード 00170-001044	TAISコード 00170-001045

非課税	月額 料金	1割
	2割	3割

清拭タイプもございます。